



POBIERANIE WYMAZU Z GARDŁA/ MIGDAŁKÓW NA BADANIE MIKROBIOLOGICZNE

INFORMACJE OGÓLNE:	1. Pacjent powinien być na czczo, nie należy myć zębów, przed pobraniem próbki należy wypłukać jamę ustną przegotowaną wodą.
POJEMNIK DO POBRANIA MATERIAŁU: SPOSÓB POBRANIA MATERIAŁU:	1. Jałowa wymazówka z podłożem transportowym Amiesa / Stuarta. 2. Wymaz pobrać wymazówką uprzednio zwilżoną jałową solą Fizjologiczną. 3. Przytrzymać język jałową szpatułką. 4. Wymaz pobrać ze zmienionych chorobowo miejsc, łuków podniebiennych, tylnej ściany gardła mocno naciskając wacik lub wykonując ruch obrotowy, starając się nie dotykać zdrowo wyglądającej błony śluzowej jamy ustnej, języka i języczka podniebiennego. 5. Wymazówkę z pobranym materiałem niezwłocznie umieścić w probówce z podłożem transportowym. 6. Opisać pojemnik imieniem i nazwiskiem pacjenta, nr PESEL lub datą urodzenia oraz nazwą materiału. Próbkę zabezpieczyć przed zakażeniem.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ:	1. Przechowywać w temperaturze pokojowej (do 24°C). 2. Transport w temperaturze pokojowej (do 24°C). Dostarczyć jak najszybciej do laboratorium, nie przekraczać 24 godzin.

Dodatkowe informacje dotyczące zlecenia badania, przechowywania i transportu materiałów biologicznych do laboratorium, laboratoryjnego oznakowania, rejestrowania i przyjmowania próbek do badań w laboratorium znajdują się w Informatorze prób mikrobiologicznych.