



**POBIERANIE WYMAZU ZE SKÓRY W KIERUNKU
NOSICIELSTWA *Staphylococcus aureus*
NA BADANIE MIKROBIOLOGICZNE**

INFORMACJE OGÓLNE:	1. Wymaz pobrać ze skóry – przed pobraniem nie stosować środków odkażających.
POJEMNIK DO POBRANIA MATERIAŁU: SPOSÓB POBRANIA MATERIAŁU:	1. Jałowa wymazówka z podłożem transportowym Amiesa/ Stuarta. 2. Wymaz pobrać wymazówką zwilżoną uprzednio jałową solą Fizjologiczną. 3. Wymaz pobrać ze skóry (pachwina / dół pachowy) pocierając zdecydowanym ruchem niewielki obszar skóry i niezwłocznie umieścić wymazówkę w probówce z podłożem transportowym. 4. Opisać pojemnik imieniem i nazwiskiem pacjenta, nr PESEL lub datą rodzenia oraz nazwą materiału. Próbkę zabezpieczyć przed zakażeniem.
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT MATERIAŁU DO BADAŃ:	1. Przechowywać w temperaturze pokojowej (do 24°C). 2. Transport w temperaturze pokojowej (do 24°C). Dostarczyć jak najszybciej do laboratorium, nie przekraczać 24 godzin.

Dodatkowe informacje dotyczące zlecenia badania, przechowywania i transportu materiałów biologicznych do laboratorium, laboratoryjnego oznakowania, rejestrowania i przyjmowania próbek do badań w laboratorium znajdują się w Informatorze prób mikrobiologicznych.